


## Velký toaletní a sprchový vozík

Číslo modelu: RSC02

# Návod k obsluze

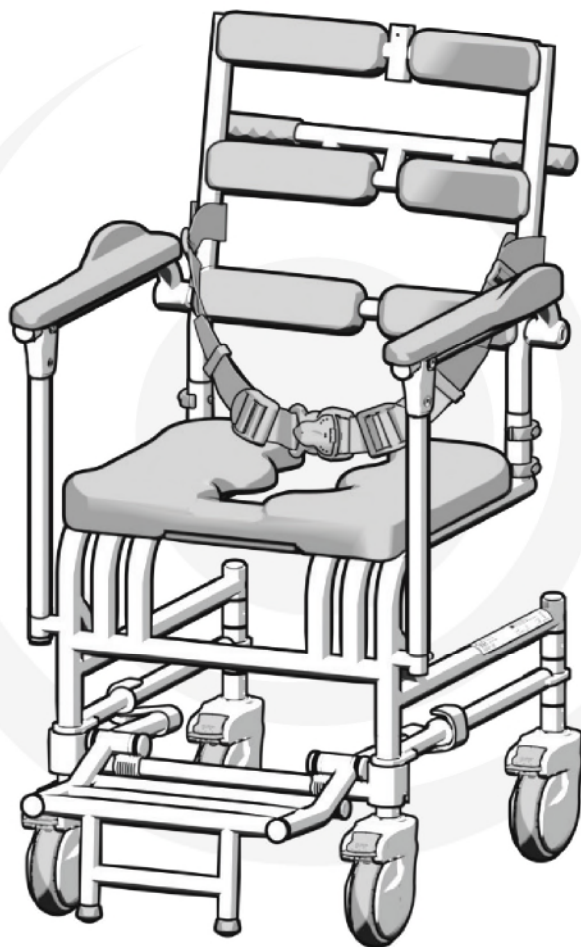

*Děkujeme, že jste si vybrali naše produkty. Tento návod MUSÍ být předán uživateli. Přečtěte si prosím tento návod k obsluze ještě PŘED použitím produktu a uschovejte jej pro budoucí použití.*



*Osoby s poruchou zraku, kognitivními funkcemi nebo nedostatkem čtenářských dovedností by se měly obrátit na prodejce s žádostí o vhodnou pomoc při porozumění této příručce.*



Všechna práva vyhrazena společností AFH Europe sp. z o.o. Reprodukce nebo úprava celého dokumentu nebo jeho části je zakázána bez předchozího písemného souhlasu společnosti AFH

–

# OBSAH

## 1 OBECNÉ INFORMACE

---

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Zamýšlené použití výrobku 4.....     |   |
| Technické specifikace .....          | 5 |
| Fotografie výrobku .....             | 6 |
| Obrázek .....                        | 8 |
| Místo umístění typového štítku ..... | 8 |

## 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

---

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Obecné pokyny .....                                                       | 9  |
| Manipulace s výrobkem .....                                               | 9  |
| Seznam položek, které mají být zkontrolovány z hlediska bezpečnosti ..... | 13 |

## 3 PŘED POUŽITÍM

---

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Technické specifikace místností ..... | 14 |
|---------------------------------------|----|

## 4 PROVOZ VOZÍKU

---

|                        |    |
|------------------------|----|
| Kola .....             | 16 |
| Opěrka nohou .....     | 18 |
| Opěrky rukou .....     | 21 |
| Rukojeti .....         | 24 |
| Bezpečnostní pás ..... | 26 |

## 5 ÚDRŽBA

---

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Čištění .....           | 27 |
| Skladování vozíku ..... | 28 |
| Likvidace .....         | 28 |

## 6 KONTAKTNÍ ÚDAJE

---

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Kontaktní údaje .....   | 29 |
| Hlášení incidentů ..... | 29 |

## 7 OSVĚDČENÍ O SHODĚ

---

30

# 1 OBECNÉ INFORMACE

---



## 1.1 Účel použití výrobku

- Tento produkt je určen pro uživatele s omezenou pohyblivostí, zejména pro pomoc při používání sprchy a toalety.  
AFH Europe sp. z o.o. (dále jen „AFH“) důrazně doporučuje, aby uživatelé před aktivním používáním tohoto produktu požádali o radu své zdravotnické pracovníky.
- Tento produkt je určen **POUZE** pro vnitřní použití, zejména na klinikách, v nemocnicích nebo interiérech, které splňují kritéria integračního návrhu. Výrobek **NEPOUŽÍVEJTE** na měkkých površích, jako je písek, tráva nebo štěrk.
- Toto zařízení **MUSÍ** obsluhovat vyškolení pečovatelé.
- Když uživatel používá tento produkt, **MUSÍ** být přítomen pečovatel, který mu poskytne pomoc.
- **NEDOVOLTE** dětem hrát si s tímto výrobkem nebo jej obsluhovat.
- AFH důrazně doporučuje uživatelům změřit všechny rozměry místnosti v souladu s technickými specifikacemi (viz str. 14-15) a posoudit technickou specifikaci výrobku (viz str. 5) v souladu s každodenní praxí před aktivním používáním sprchového vozíku. Pokud rozměry nejsou známy, obraťte se o pomoc na místního prodejce.
- Tento produkt je kompatibilní s toaletním a sprchovým vozíkem (číslo modelu: SS3008R), který usnadňuje používání sprchy, a byl navržen společností Automation For Humanity Ltd. Pokud potřebujete další informace, obraťte se na svého místního prodejce.

# 1 OBECNÉ INFORMACE

## 1.2 Technické specifikace

|                                                 |                                            |  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| <b>CELKOVÉ ROZMĚRY<br/>(ROZLOŽENÉ)</b>          | (délka: 825 x šířka: 628 x výška: 1107) mm |  |
| * DÉLKA PO SKLOPENÍ                             | 726 mm                                     |  |
| * VÝŠKA LOKETNÍ OPĚRKY PO ZVEDNUTÍ              | 1210 mm                                    |  |
| POLOMĚR OTÁČENÍ (360° S PLYNULÝM POHYBEM VPŘED) | 940 mm                                     |  |
| POLOMĚR OTÁČENÍ (180° PŘI POHYBU VZAD)          | 730 mm                                     |  |
| ŠÍŘKA SEDADLA                                   | 500 mm                                     |  |
| HLOUBKA SEDADLA                                 | 420 mm                                     |  |
| VZDÁLENOST SEDADLA OD PODLAHY                   | 570 nebo 590 mm (viz str. 9)               |  |
| TYP OPĚRADLA A ÚHEL NATOČENÍ                    | Nenaklápěcí, 1 0 1 s                       |  |
| OPĚRKA NOHOU                                    | Odpružená, skládací                        |  |
| PRŮMĚR KOLA                                     | 125 mm                                     |  |
| BLOKOVÁNÍ KOL                                   | Ano                                        |  |
| MATERIÁLY                                       | SUS304,AL6063,ABS, PC, PE, PU              |  |
| HMOTNOST (PŘIBLIŽNÁ)                            | 20,25 kg                                   |  |
| HMOTNOST BALENÍ (PŘIBLIŽNÁ)                     | 22 kg                                      |  |
| MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ (TĚLESNÁ HMOTNOST UŽIVATELE) | 200 kg                                     |  |
| ODHADOVANÁ ŽIVOTNOST:                           | 3 roky                                     |  |

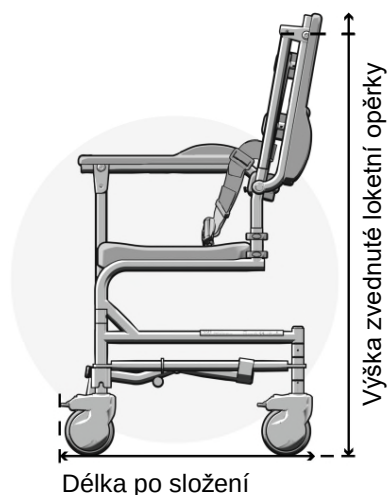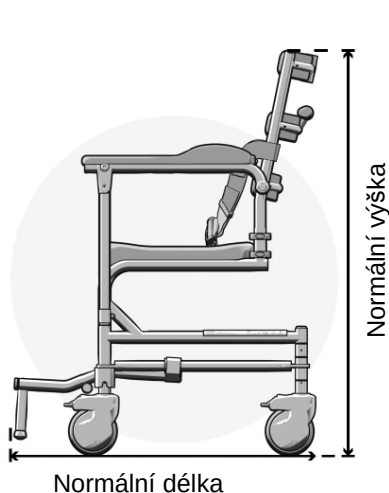

# 1 OBECNÉ INFORMACE

---

## 1.3 Fotografie výrobku

### POHLED NA VOZÍK PO SKLOPENÍ



Pohled shora



Pohled shora



Zadní pohled



Čelní pohled



Pohled z levé strany



Pohled z pravé strany

# 1 OBECNÉ INFORMACE

---

## 1.3 Fotografie výrobku

### POHLED NA VOZÍK PO ROZLOŽENÍ



**Pohled shora**



**Pohled shora**



**Zadní pohled**



**Čelní pohled**




**Pohled z levé strany**



**Pohled z pravé strany**


# 1 OBECNÉ INFORMACE

## 1.4 Schéma

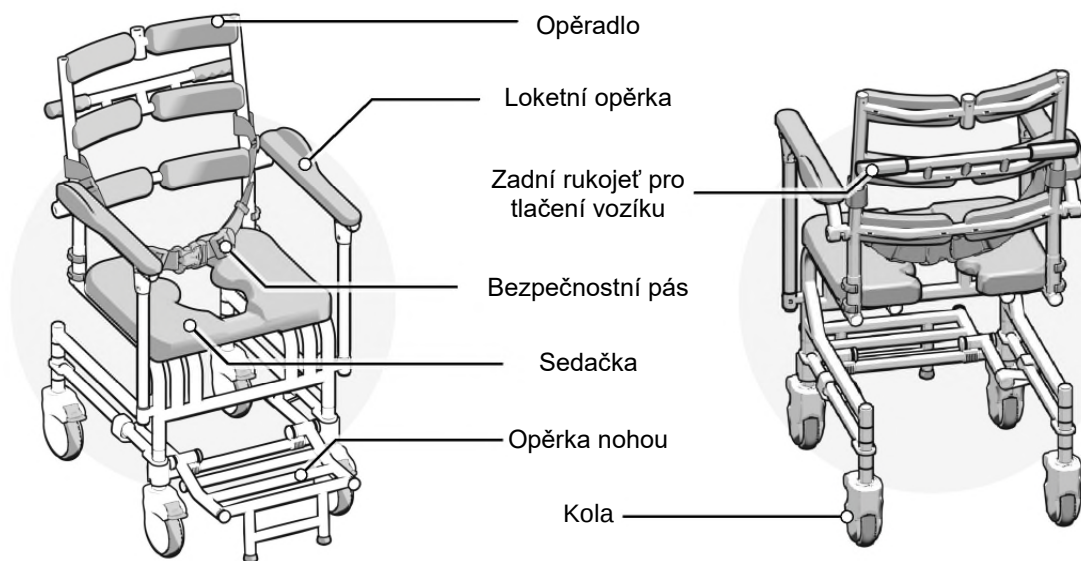

## 1.5 Místo umístění typového štítku

- Před použitím výrobku si přečtěte typové štítky. Výrobní štítky by měly být uchovány neporušené pro budoucí použití a záruku. Otázky týkající se výměny nebo záruky byste měli směřovat na místního prodejce.

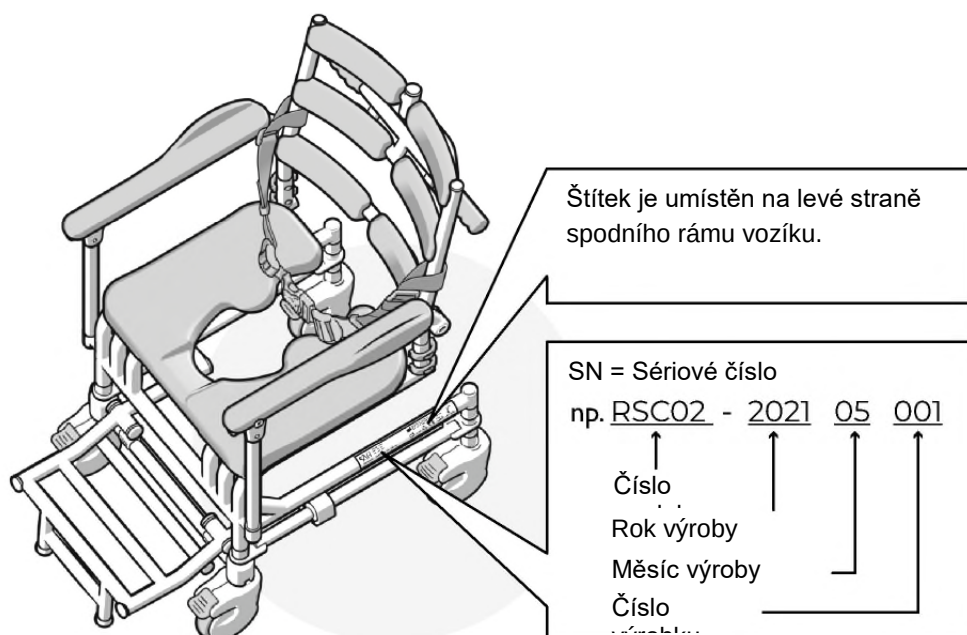



## 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

---

### 2.1 Obecné pokyny



#### **VAROVÁNÍ**

**NEPOUŽÍVEJTE** tento výrobek nebo jiné dostupné vybavení, aniž byste se nejprve seznámili s touto příručkou a porozuměli jejímu obsahu, stejně jako dalším instruktážním materiálům poskytnutým vaším prodejcem s tímto výrobkem. Pokud jsou varování, oznámení nebo pokyny nesrozumitelné, obraťte se na zdravotnického pracovníka, prodejce nebo technického pracovníka před pokusem o použití tohoto zařízení, aby nedošlo ke zranění osob nebo poškození zařízení.



#### **UPOZORNĚNÍ NA POŽÁRNÍ ODOLNOST**

Tento výrobek **NENÍ** ohnivzdorný. **Nepokládejte** ani nepoužívejte v blízkosti ohně, kamen nebo v blízkosti jiného zdroje ohně nebo jisker. Při používání tohoto produktu **NEKUŘTE**.



#### **VAROVÁNÍ PŘED POUŽITÍM PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Příslušenství navržené jinými výrobci, které nebylo testováno AFH, se **NEDOPORUČUJE** používat s tímto výrobkem.

### 2.2 Manipulace s výrobkem



#### **VAROVÁNÍ PŘED POHYBEM**

**NA SVAZÍCH,**

#### **SCHODECH A PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK**

Výrobek **NEPOUŽÍVEJTE** k pohybu nahoru nebo dolů po svahu větším než 1:6 (tj. 9,5°).

**NEPOKOUŠEJTE SE** výrobek přemísťovat po schodech.

**NEPOKOUŠEJTE SE** překonávat obručníky nebo jiné překážky.

**NENECHÁVEJTE** prázdný vozík nebo vozík s uživatelem na svahu bez dozoru.



#### **VAROVÁNÍ PŘED ZVEDÁNÍM**

**NEPOKOUŠEJTE SE** zvedat vozík za pohyblivé nebo odnímatelné součásti.

## 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

---

### 2.2 Manipulace s výrobkem



#### VAROVÁNÍ OHLEDNĚ BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ

Uživatelé by si měli **VŽDY** zapnout bezpečnostní pásy. Délka nastaveného bezpečnostního pásu **MUSÍ** být přizpůsobena tělu uživatele. Podrobné informace o provozu a nastavení bezpečnostních pásů naleznete na straně 26. Bezpečnostní pás se používá pouze k udržení uživatele vozíku ve vzpřímené poloze. Pás není navržen tak, aby vydržel velké zatížení, jako jsou bezpečnostní pásy např. ve vozidlech a letadlech. Pokud zaznamenáte známky opotřebení, **MUSÍTE PÁS OKAMŽITĚ** vyměnit.



#### BLOKOVÁNÍ KOL

**NEPOKOUŠEJTE SE** zastavit pohybující se kočárek pomocí zámků kol. Zámky kol nejsou brzdy. Před stisknutím zámků kol se ujistěte, že se vozík zastavil. Před přemístěním uživatele a po použití vozíku **VŽDY** zajistěte všechna kola. Použití zámků kol nesmí zabránit pohybu sprchového vozíku na mokřích, kluzkých nebo nerovných podlahách. Při přepravě uživatele do a z vozíku buďte **VŽDY** opatrní.

## 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

---

### 2.2 Manipulace s výrobkem



#### VAROVÁNÍ PŘED SAHÁNÍM NA PODLAHU A NAKLÁNĚNÍM


Při sezení na vozíku se **NESNAŽTE** dosáhnout na předměty na podlaze. AFH důrazně doporučuje pečovatelům, aby pomohli uživatelům zvednout potřebné předměty z podlahy podle potřeby. V případě potřeby umístěte vozík co nejbližší k danému předmětu a dosáhněte na něj na délku paže, aniž byste měnili polohu uživatele vsedě.

#### DOSAŽ A OHÝBÁNÍ

Tento výrobek **UMOŽŇUJE** uživatelům v konkrétních případech naklonit se dopředu, aby si mohli umýt nohy nebo provádět jiné pečovatelské činnosti. V takových případech zajistěte, aby:

- i) si uživatelé správně zapnuli bezpečnostní pásy;
- ii) opěrka nohou byla v normální poloze a nohy uživatele spočívaly na opěrce nohou (viz str. 19-20);
- iii) přední kola byla nasměrována a vysunuta co nejdále dopředu; Chcete-li to provést, posuňte vozík dopředu a poté dozadu v přímém směru.
- iv) kola byla uzamčena.

Aby bylo možné určit, jak daleko bezpečně dosáhnete, měl by uživatel před pokusem o samostatné použití vozíku nacvičit provádění každodenních činností v přítomnosti zdravotnického pracovníka.

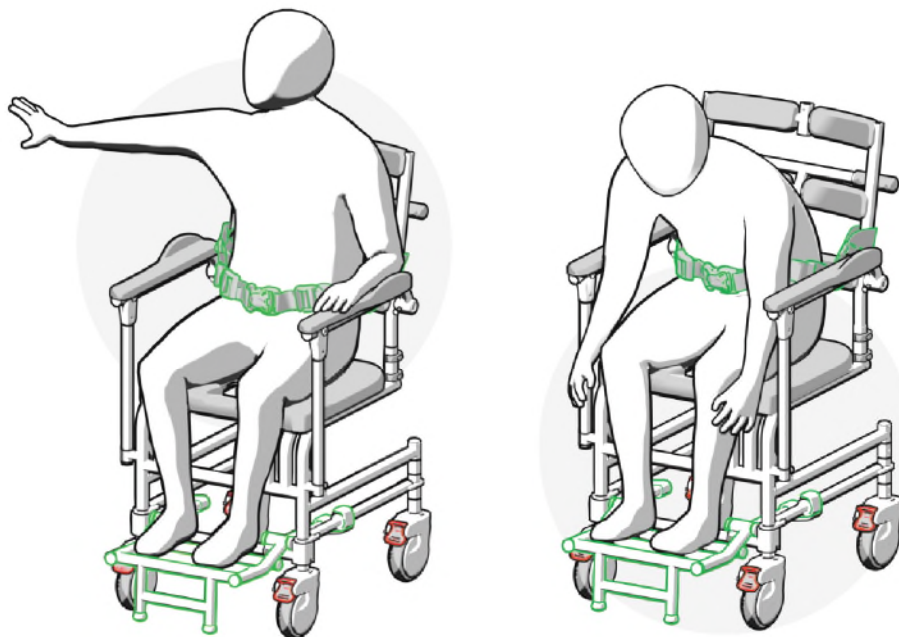

## 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

---

### 2.2 Manipulace s výrobkem

- **PŘESUN UŽIVATELE DO A Z VOZÍKU**

AFH doporučuje, aby při přepravě uživatele do a z vozíku pomáhal alespoň jeden vyškolený pečovatel. Ujistěte se, že:

- a) vozík je co nejbližší k místu, na které se uživatel přemísťuje, a všechna kola jsou v poloze rovnoběžné s tímto místem;
- b) jsou všechna kola uzamčena, aby se vozík nemohl pohybovat;
- c) loketní opěrka na straně, na které se uživatel přesouvá, je zdvížená.

Tyto činnosti může provádět více než jeden pečovatel a s různými bezpečnostními limity v závislosti na pohyblivosti a síle horní části těla uživatele. Aby bylo možné určit a stanovit bezpečné limity pohybu, měl by uživatel před pokusem o samostatné použití vozíku nacvičit provádění každodenních činností v přítomnosti zdravotnického pracovníka.



## 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

---

### 2.3 Seznam položek, které mají být zkontrolovány z hlediska bezpečnosti

- **SEZNAM POLOŽEK, KTERÉ MAJÍ BÝT ZKONTROLOVÁNY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI**

Před použitím vozíku a po seřízení součástí vozíku **VŽDY** zkontrolujte vyměněné součásti, abyste předešli potenciálnímu nebezpečí. V případě potřeby díly vozíku opravte nebo vyměňte. V případě potřeby se obraťte na svého místního prodejce.

#### **PŘED POUŽITÍM:**

- ☐ Ujistěte se, že se vozík pohybuje v přímé linii bez nadměrného odporu nebo naklánění na jednu stranu.
- ☐ Ujistěte se, že zámky kol **NEPŘEKÁŽÍ** pneumatikám kol v odemčené poloze.
- ☐ Ujistěte se, že zámky kol zabraňují tomu, aby se kola po zablokování pohybovala.
- ☐ Zkontrolujte opotřebení bezpečnostního pásu a upevňovacích prvků.
- ☐ Ujistěte se, že je spona bezpečnostního pásu zapnutá.
- ☐ Zkontrolujte opotřebení nebo uvolnění přední a zadní rukojeti.
- ☐ Zkontrolujte všechno polstrování, zda nevykazuje známky opotřebení, uvolnění a poškození.
- ☐ Zkontrolujte, zda není uvolněné nebo nechybí montážní díly.
- ☐ Zkontrolujte, zda na rámech nejsou nerovné nebo ostré hrany.
- ☐ Zkontrolujte rám sedadla, rám opěradla, loketní opěrku a opěrku nohou, zda nejsou ohnuté.
- ☐ Zkontrolujte, zda jsou všechny štítky umístěny a čitelné.

#### **PO REGULACI:**

- ☐ Zkontrolujte, zda je nastavení vozíku přizpůsobeno potřebám denních aktivit a okolí.
- ☐ Zkontrolujte, zda je vozík vyrovnaný a symetricky vyvážený.
- ☐ Zkontrolujte, zda není uvolněné nebo nechybí montážní díly.

- **ŘÍZENÍ RIZIK**

AFH také doporučuje, aby si uživatelé nechali zařízení jednou ročně zkontrolovat kvalifikovaným technikem a zdravotnickým pracovníkem.


### 3 PŘED POUŽITÍM

---

#### 3.1 Technické specifikace místností

- **KOUPELNA**

Níže uvedené rozměry platí **POUZE** pro sprchový vozík RSC02. Pokud se používá společně s toaletním vozíkem nebo jinými výrobky, obraťte se předem na svého místního prodejce. Do označeného volného prostoru **NEUMISŤUJTE** žádné jiné prvky (např. umyvadlo, zábradlí atd.).


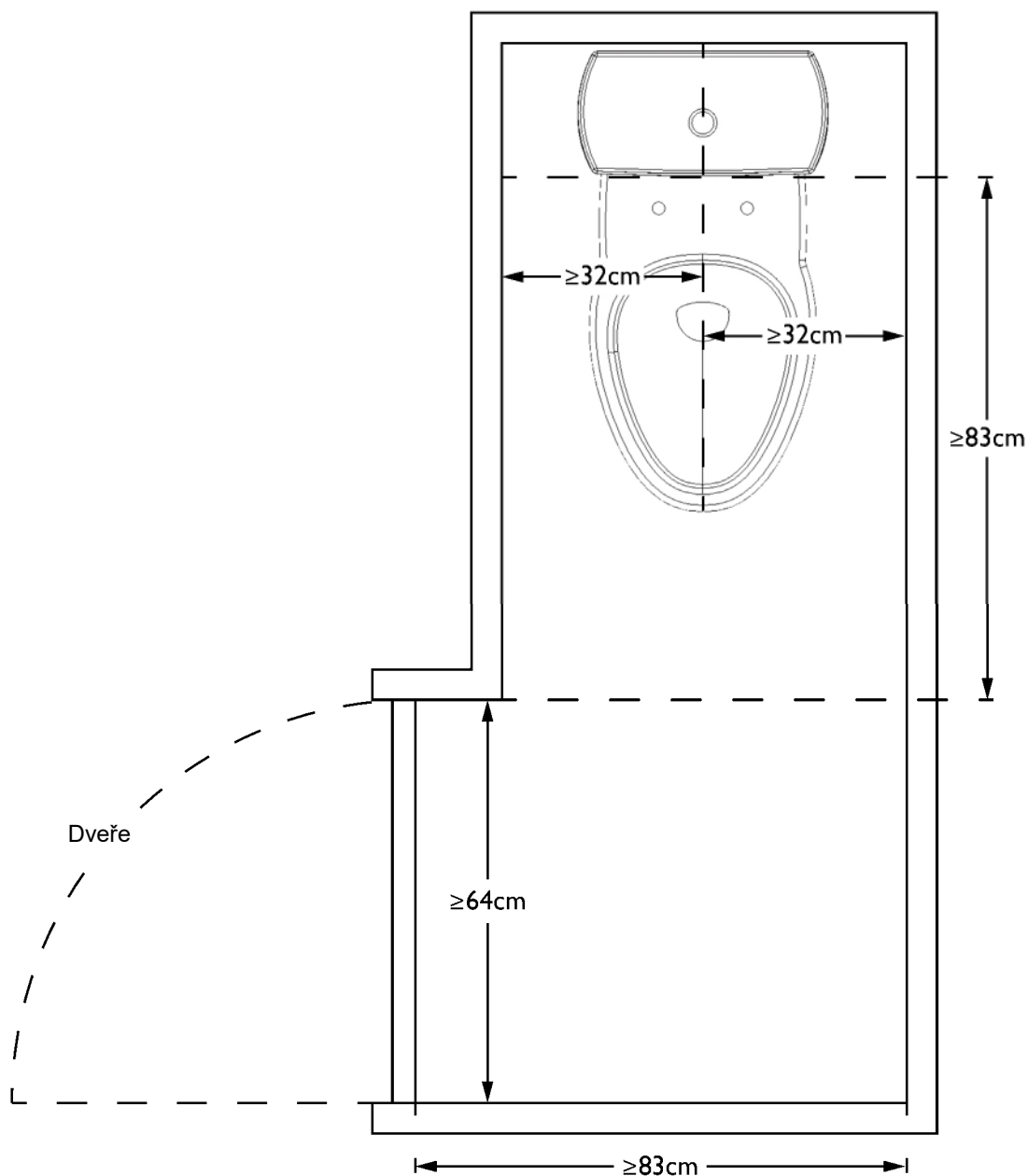


### 3 PŘED POUŽITÍM

#### 3.1 Technické specifikace místností

- **ROZMĚRY TOALETY**

Uživatel si může podle níže uvedené tabulky a schémat vybrat toalety, které odpovídají sprchovému vozíku. V případě potřeby se obraťte na svého místního prodejce pro předchozí měření konkrétní místnosti.

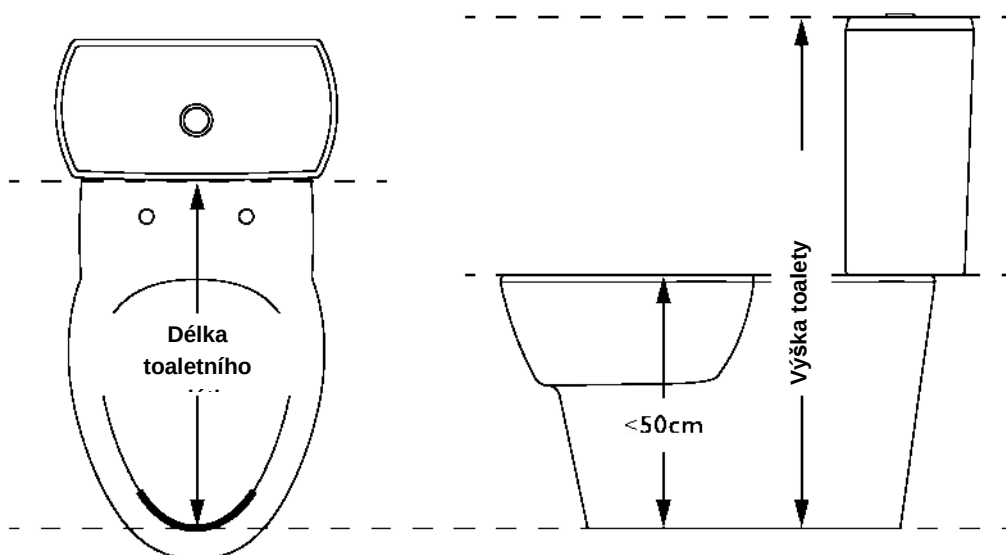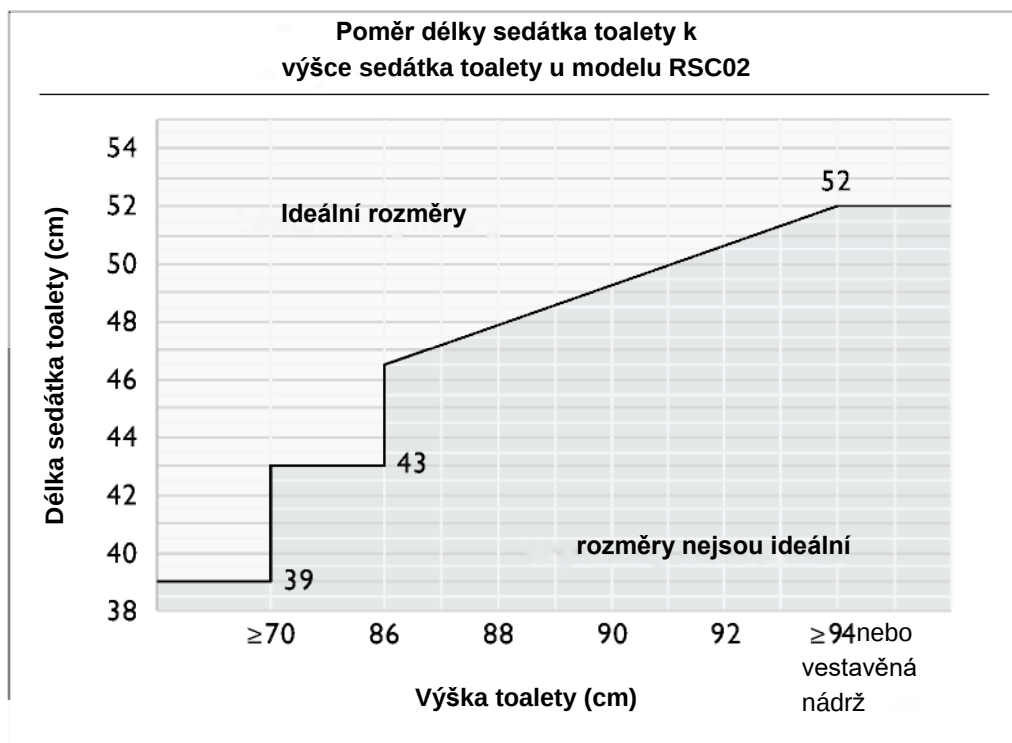


### 4.1 Kola





#### VAROVÁNÍ PŘED BODEM MOŽNÉHO SKŘÍPNUTÍ

Zámky kol jsou navrženy pro ovládání tlakem nohou.

**NEPOKOUŠEJTE SE** ovládat zámek holýma rukama, protože by to mohlo mít za následek zranění osob nebo poškození vozíku. Upozornění a poznámky k bezpečnosti blokování kol naleznete na str. 9.

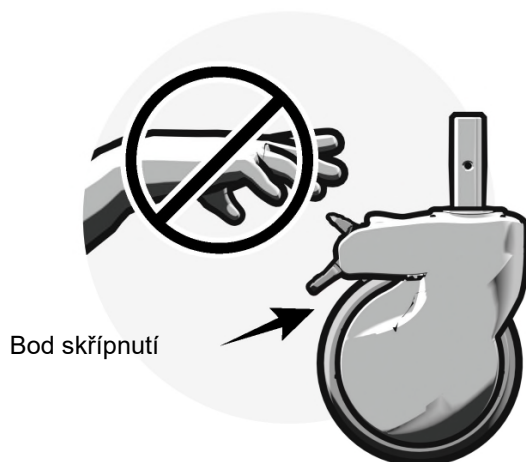

#### • ZAMKNUTÍ A UVOLNĚNÍ ZÁMKU KOL

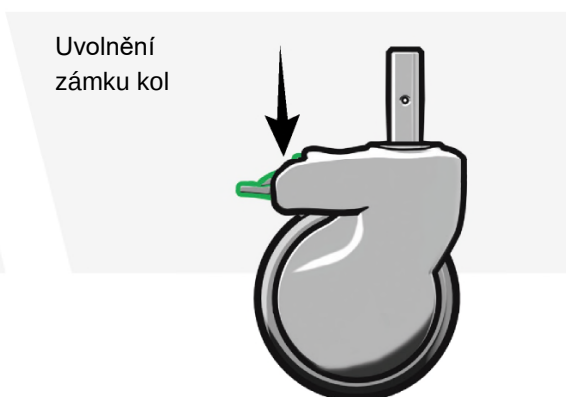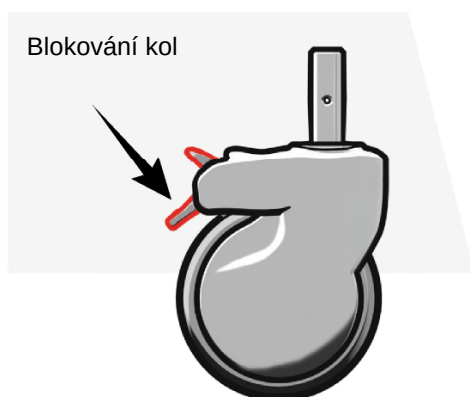




## 4 OBSLUHA VOZÍKU

---

### 4.1 Kola

- **ZAMKNUTÁ POLOHA**

Pro zablokování předních kol musí zámky směřovat dopředu. Chcete-li to provést, posuňte vozík dopředu a poté dozadu v přímém směru.

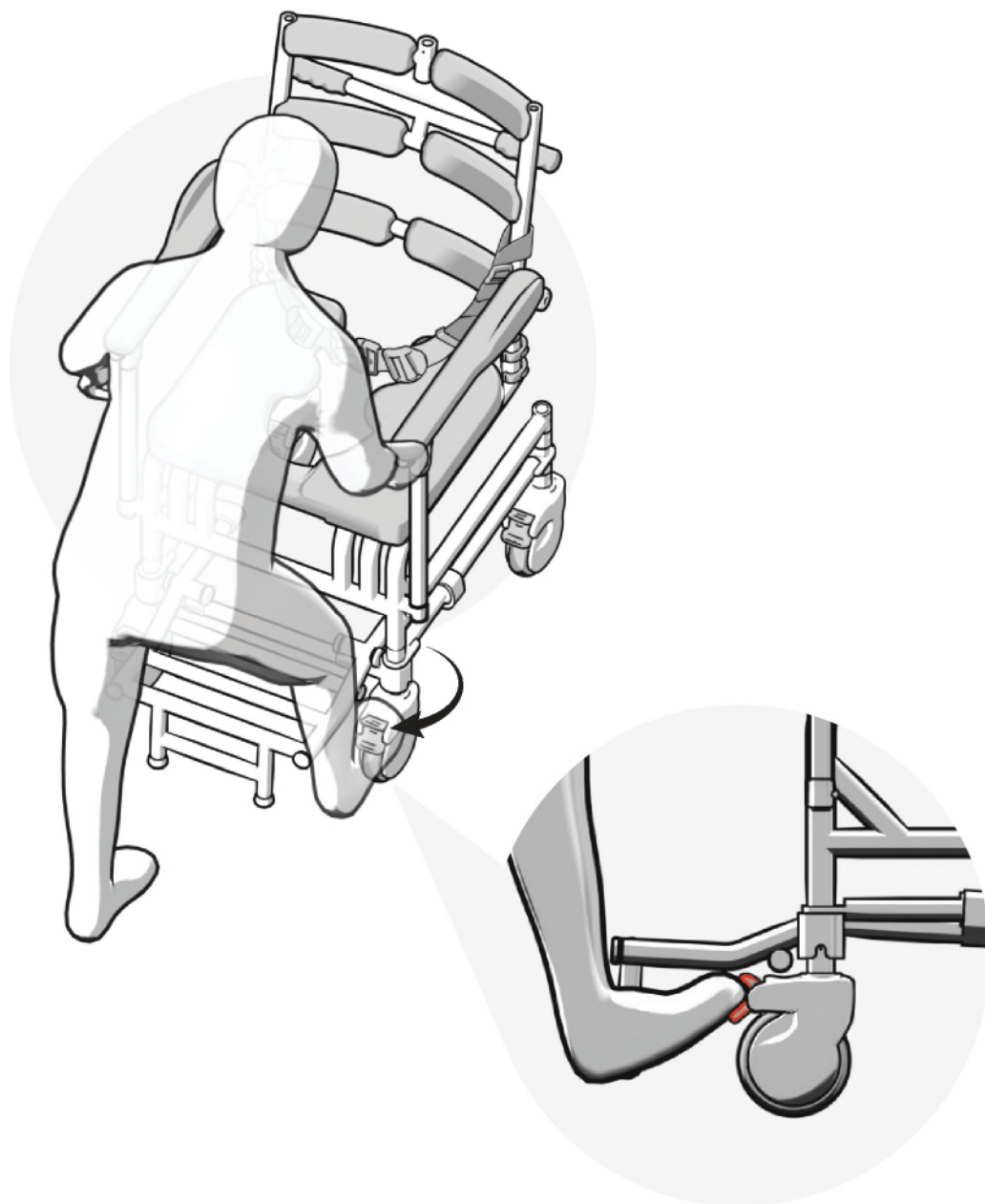

### 4.2 Opěrka nohou




#### VAROVÁNÍ

Opěrka nohou se skládá z pohyblivých částí. **VŽDY** postupujte podle níže uvedených pokynů, aby nedošlo ke zranění osob nebo poškození vozíku. AFH důrazně souhlasí s tím, aby alespoň jeden pečovatel pomáhal uživateli při obsluze opěrky nohou.



#### VAROVÁNÍ PŘED BODEM MOŽNÉHO SKŘÍPNUTÍ



Opěrka nohou je navržena pro ovládání nohou. **NEPOKLÁDEJTE** ruce na místa, kde hrozí přimáčknutí, aby nedošlo ke zranění osob nebo poškození vozíku.

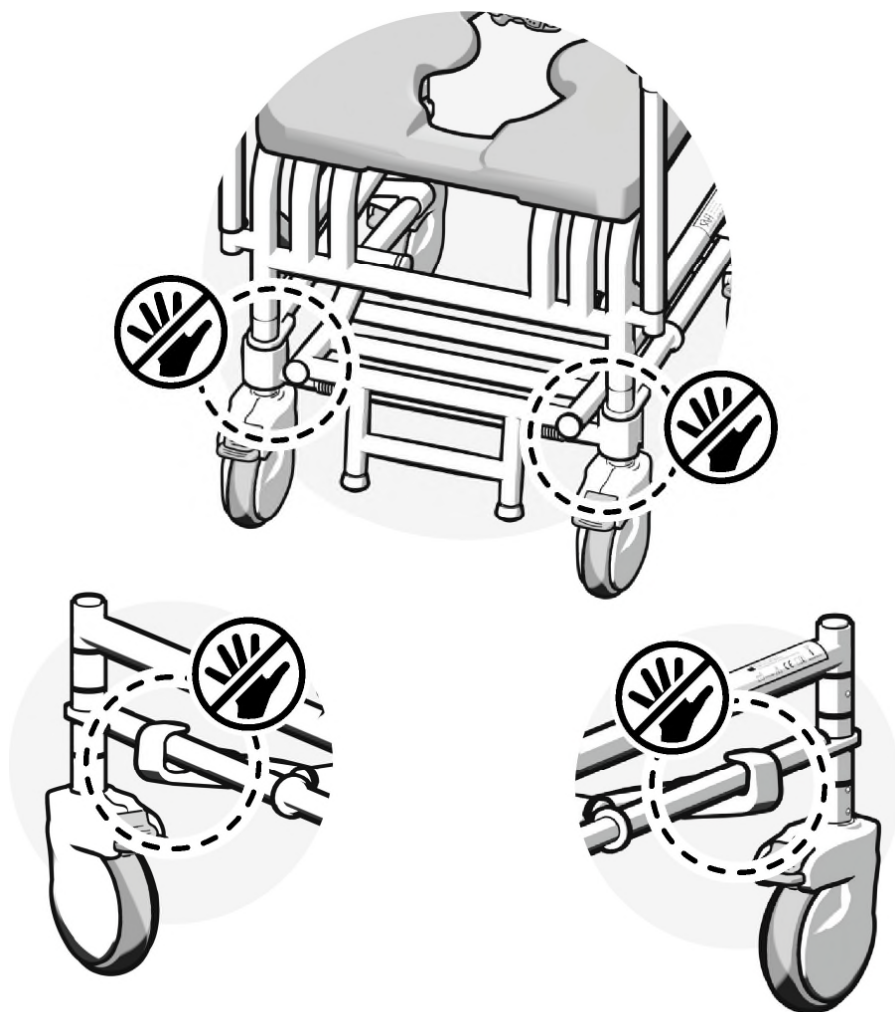

### 4.2 Opěrka nohou


- **POLOHA NOHOU**

Když uživatel sedí na vozíku, **MUSÍ** mít nohy vždy na podnožce, kdykoli je to možné; prsty by měly směřovat dopředu a chodidla by měla být umístěna na třech rovnoběžných pólech. AFH doporučuje, aby pečovatelé kontrolovali a pomáhali uživatelům umístit nohy do správné polohy, aby nedošlo ke zranění nebo poškození vozíku.

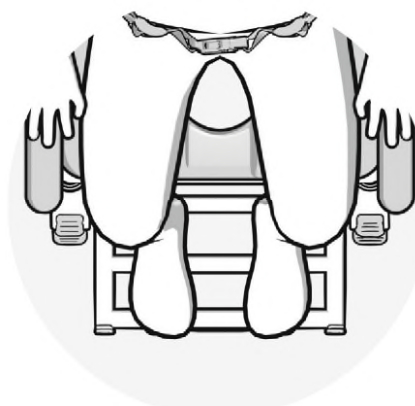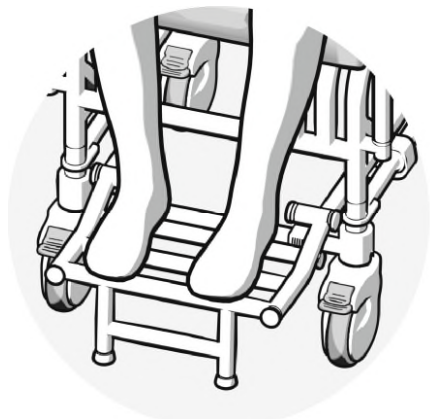


- **OPĚRKA NOHOU VE SLOŽENÉ POLOZE**

Opěrku nohou lze složit **POUZE**, když se **NEPOUŽÍVÁ**. Chcete-li to provést, stabilizujte vozík držením předních rukojetí nebo zablokováním všech rukojetí, poté jemně zvedněte a zatlačte opěrku nohou pod vozík, dokud nebude přední část opěrky nohou umístěna na pružinové tyči.

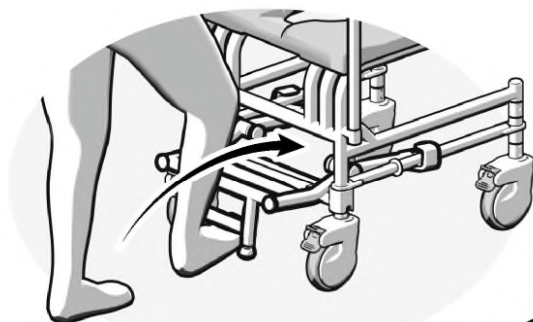


Pružinová tyč

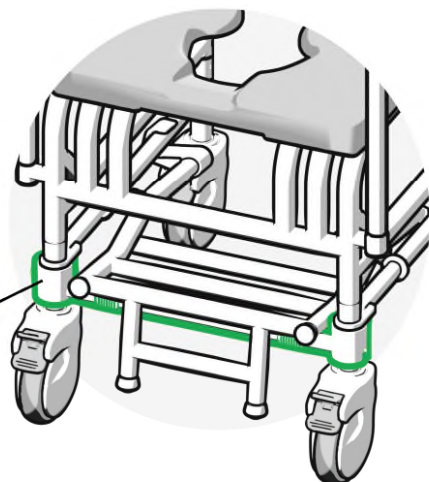

### 4.2 Opěrka nohou


#### • POLOHA OPĚRKY NOHOU NA VYSOKÉM SVAHU

Při vysunutí nožní opěrce se vozík může pohybovat na svahu se sklonem menším než 1:8 (tj. 7°). V případě sklonu většího než 1:8 až 1:6 (tj. 9,5°) **MUSÍ** být poloha opěrky nohou dočasně nastavena podle stupně sklonu země. Chcete-li to provést, jemně zvedněte opěrku nohou jednou nohou a zasuňte ji do poloviny vozíku, dokud středová trubka nebude viset na pružinové tyči.

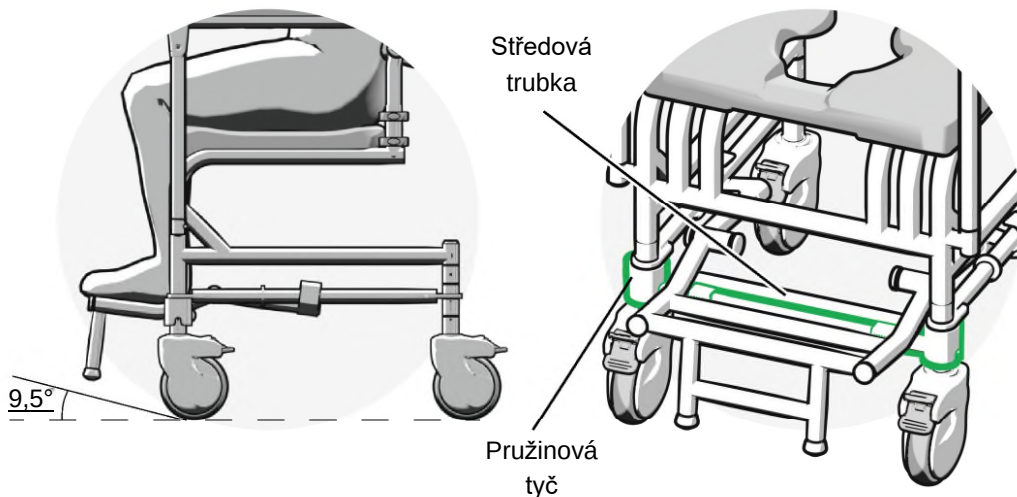

#### • NORMÁLNÍ POLOHA OPĚRKY NOHOU

AFH doporučuje, pokud je to možné, aby byla opěrka nohou během používání rozložena do normální polohy. Chcete-li to provést, stabilizujte vozík držetím rukojetí nebo zablokováním všech kol a poté jemně zvedněte a vysuňte opěrku nohou jednou nohou, dokud přední část rozloženého madla nebude umístěna na pružinové tyči.

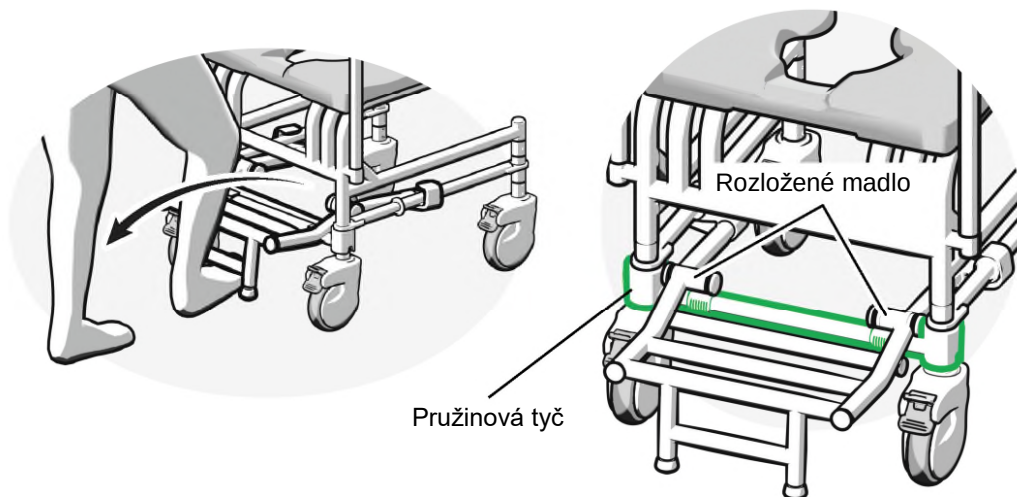

### 4.3 Opěrky rukou




#### VAROVÁNÍ

Opěrky rukou se skládají z pohyblivých částí. **VŽDY** postupujte podle níže uvedených pokynů, aby nedošlo ke zranění osob nebo poškození vozíku. Loketní opěrky **MUSÍ BÝT** vždy obsluhovány vyškoleným manipulátorem.



#### VAROVÁNÍ PŘED BODEM MOŽNÉHO SKŘÍPNUTÍ

Při nastavování polohy područek dávejte pozor, abyste nepoložili ruce na body, kde hrozí skřípnutí.

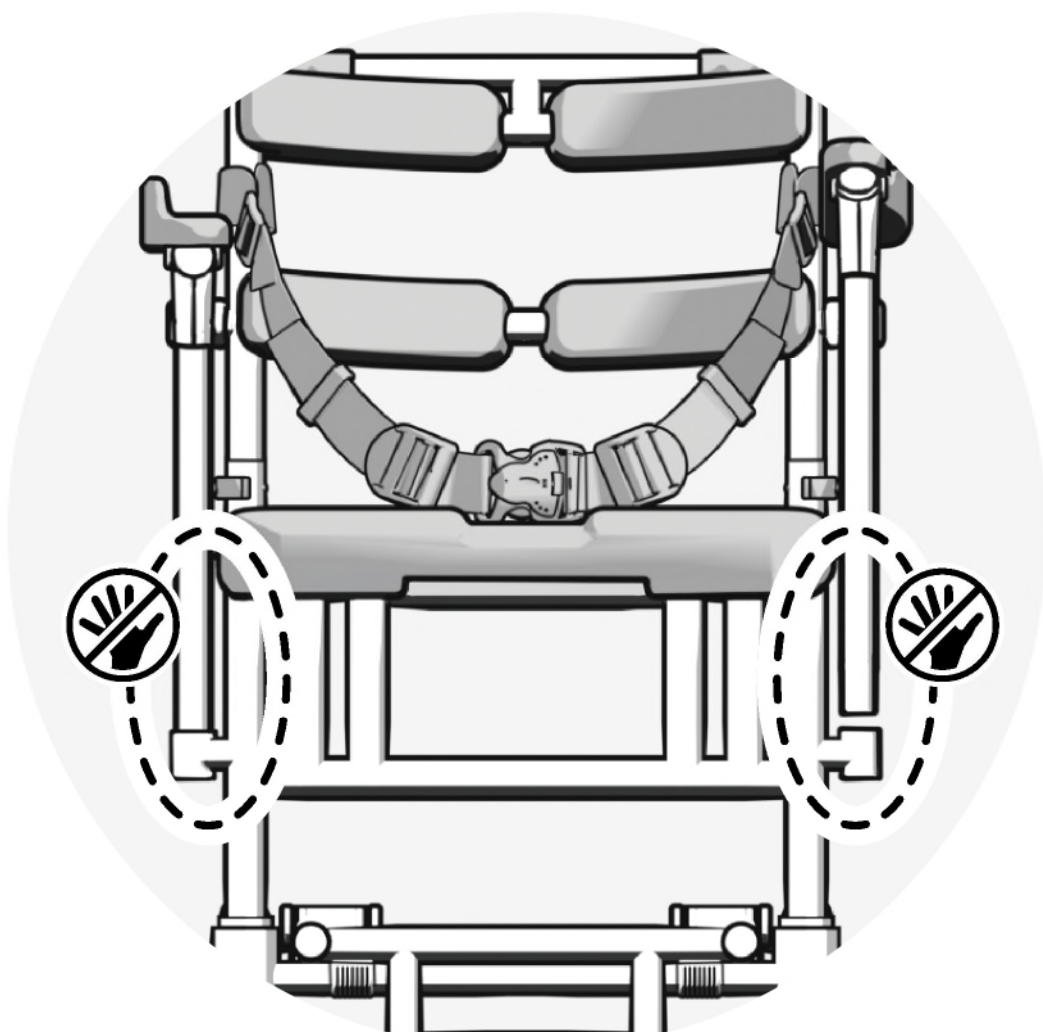

## 4 OBSLUHA VOZÍKU

---


### 4.3 Opěrky rukou

- **NORMÁLNÍ POLOHA**

Loketní opěrky by měly být **VŽDY** spuštěny vodorovně a svislé podpěry **MUSÍ** být připevněny k základovému rámu vozíku a zajištěny pružinovými zámky.

- **VYVÝŠENÁ/ZVEDNUTÁ POZICE**

Při přesunu uživatele z nebo do vozíku lze loketní opěrky dočasně zvednout. AFH doporučuje zvedat vždy pouze jednu loketní opěrku.

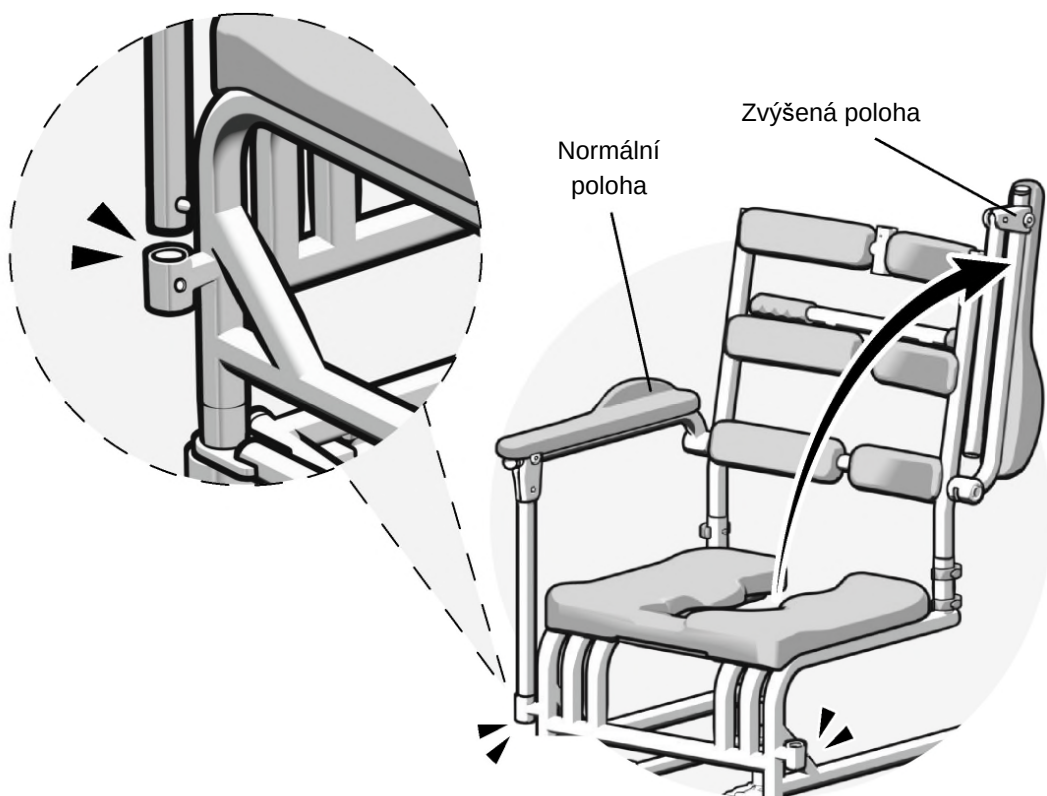




### 4.3 Opěrky rukou

- **POUŽITÍ CHRÁNIČŮ LOKTŮ**

Chrániče loktů slouží k ochraně uživatele před náhodným nárazem do překážek při pohybu na vozíku. Ujistěte se, že lokty uživatele jsou uvnitř loketních chráničů.

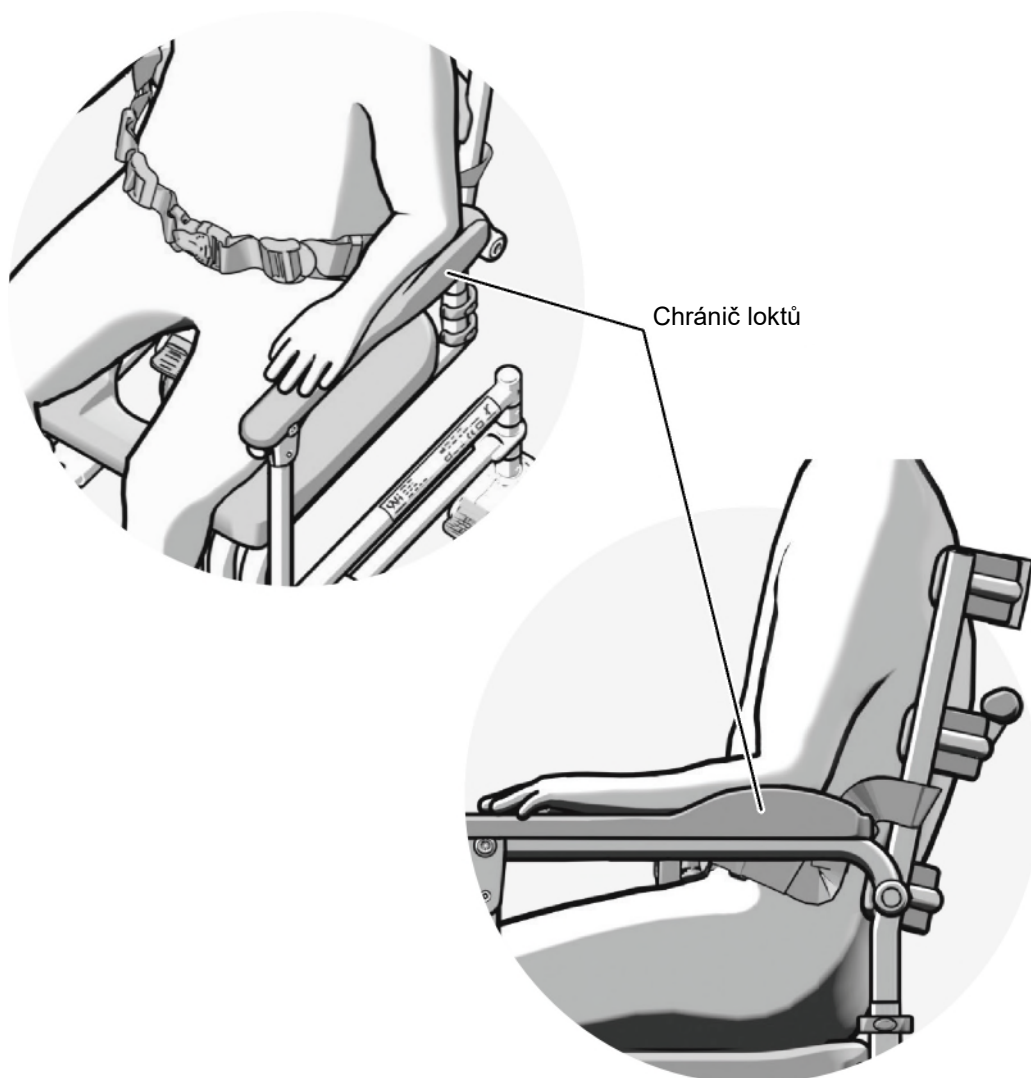

## 4 OBSLUHA VOZÍKU

---

### 4.4 Rukojeti

- **URČENÍ**

Rukojeti na zadní straně vozíku jsou navrženy tak, aby je mohli používat **POUZE** pečovatelé k přesunu vozíku. Když má být vozík umístěn nad toaletou, odstraněn z toalety nebo použit jako sprchová židle, přesuňte vozík uchopením za konce opěrek rukou.






### 4.5 Rukojeti


- **JAK DRŽET RUKOJETI**

K lepšímu držení slouží kryty rukojetí. Ujistěte se, že při práci s vozíkem jsou tyto podložky na straně prstů. V případě potřeby upravte jejich polohu. Pokud jsou uvolněné, musí být vyměněny.

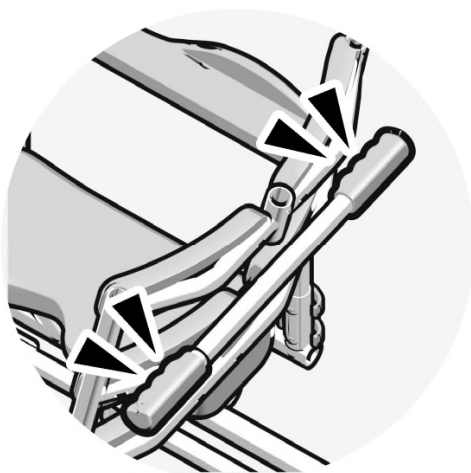

#### **VAROVÁNÍ PŘED BODEM MOŽNÉHO SKŘÍPNUTÍ**


Při jízdě s vozíkem mějte **VŽDY** ruce na rukojetích. Dávejte pozor, abyste nedrželi ruku na místě možného skřípnutí.

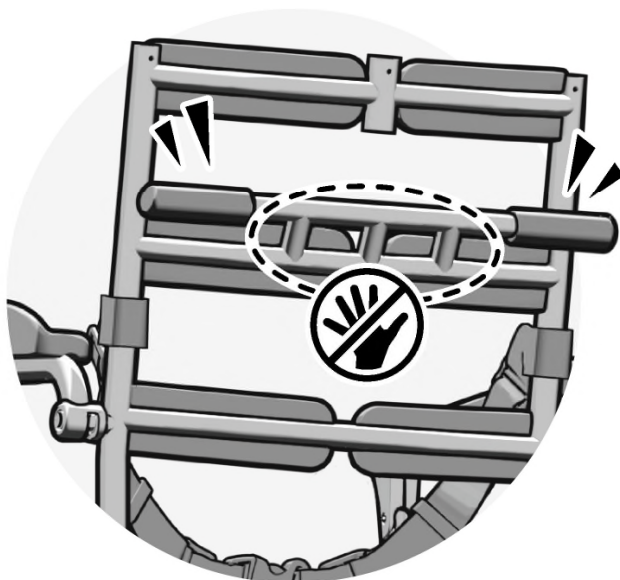

### 4.6 Bezpečnostní pás

- **UPEVNĚNÍ A ROZEPNUTÍ**


Bezpečnostní pás je navržen tak, aby zabránil náhodnému rozeptnutí uživatelem. Lze jej odemknout pouze současným stisknutím tří bodů uvedených na obrázku níže. AFH doporučuje, aby bezpečnostní pás obsluhovali **POUZE** pečovatelé.

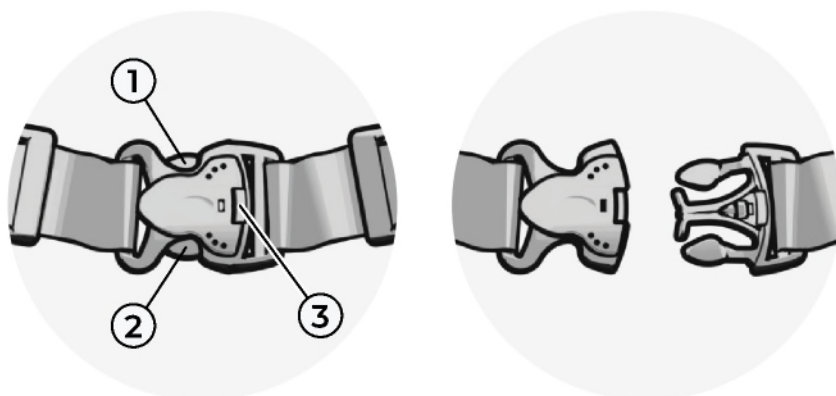

- **NASTAVITELNÁ DÉLKA**

**VŽDY** přizpůsobte délku bezpečnostního pásu potřebám jednotlivých uživatelů vozíků.

Chcete-li zkrátit délku bezpečnostního pásu, držte seřizovací sponu jednou rukou a zatáhněte za konec bezpečnostního pásu. Pro prodloužení bezpečnostního pásu zatáhněte za konec svorky. Pokud rozsah nastavení pomocí výše uvedené metody není dostatečný, **NEPOKOUŠEJTE** se nastavit délku bezpečnostního pásu pomocí upevňovací spony. **VŽDY** zajistěte konec pásu do poutka na pás.

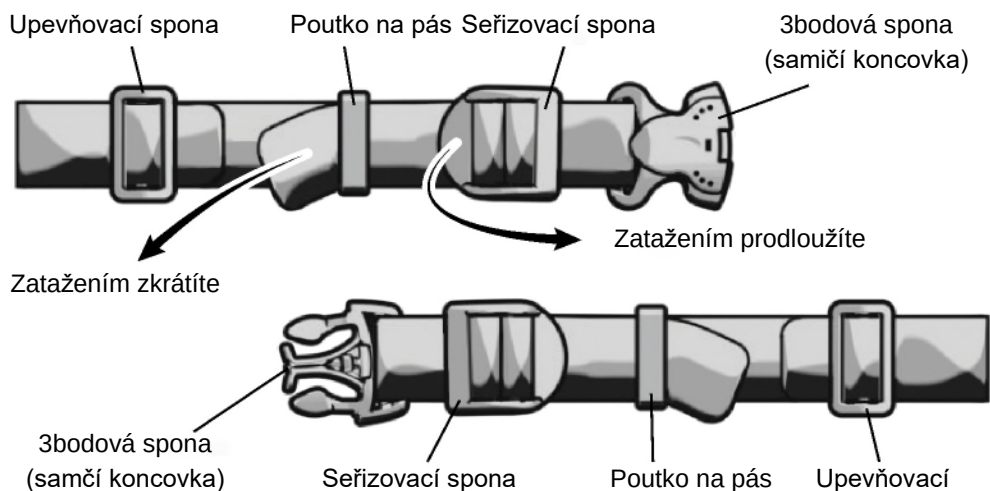

### 5.1 Čištění

- **OBEČNÁ PRAVIDLA PRO ČIŠTĚNÍ**

AFH doporučuje vozík pravidelně čistit (před a po použití) čistou vodou nebo jemným čisticím prostředkem pomocí vlhkého měkkého hadříku. **VŽDY** opláchněte čistou vodou a poté otřete suchým hadříkem. Vozík **VŽDY** udržujte v suchu. K čištění vozíku **nepoužívejte** vroucí vodu, kyseliny, vysoce alkalické čisticí prostředky, abrazivní prášky, benzín, ředidla, chlór nebo jiná organická rozpouštědla. K čištění vozíku **nepoužívejte** kartáč, aby nedošlo k poškrábání.


- **ČIŠTĚNÍ SEDADLA**

Sedadlo lze vyjmout ze základny **POUZE** pro účely čištění. **NEPOUŽÍVEJTE** vozík s odstraněným sedadlem. **NEODSTRAŇUJTE** sedadlo, když na něm uživatel sedí. Chcete-li sedadlo vyjmout, stabilizujte vozík držením rámu jednou rukou a poté sedadlo jemně vytáhněte nahoru.




#### **VAROVÁNÍ PŘED BODEM MOŽNÉHO SKŘÍPNUTÍ**

Dávejte pozor, abyste nepoložili ruku na rám v místě možného skřípnutí; vždy držte prostřední lištu, jak je znázorněno níže.

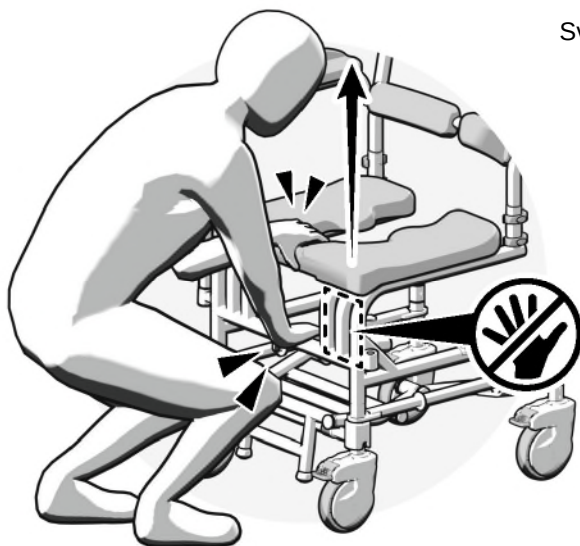

Svorky ve tvaru C

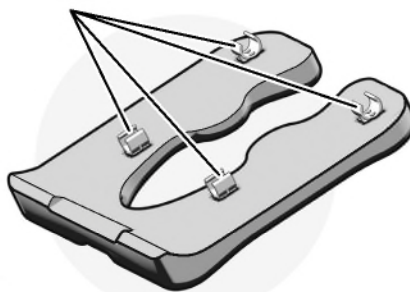

Na sedáku jsou čtyři svorky ve tvaru C.

Při čištění je **NEODSTRAŇUJTE**. Chcete-li položit podložku zpět na sedadlo, položte ji rovnoměrně na základní rám a poté jemně zatlačte na rohy podložky (nad svorkami), dokud všechny čtyři svorky nezapadnou na rám.

Poté zkontrolujte bezpečnost prvků uvedených na kontrolním seznamu.

## 5 ÚDRŽBA

---

### 5.2 Skladování vozíku

- **OBEČNÁ PRAVIDLA PRO SKLADOVÁNÍ**

AFH doporučuje skladovat vozík v suché místnosti, pokud se nepoužívá. Vyvarujte se vystavení vozíku přímému slunečnímu záření, abyste zabránili poškození součástí vozíku.

### 5.3 Likvidace

- **OBEČNÁ PRAVIDLA PRO LIKVIDACI**

Dodržujte místní zákony o likvidaci výrobků. Při likvidaci poškozených částí postupujte opatrně, aby nedošlo ke zranění osob.

- **VRÁCENÍ A OPRAVA VÝROBKU**

Výrobek **NEVRACEJTE** výrobci bez jeho předchozího souhlasu.

Pokud potřebujete další informace, obraťte se na svého místního prodejce.

## 6 KONTAKTNÍ ÚDAJE

---

### 6.1 Obecné kontaktní údaje

- **AFH EUROPE SP. Z O.O. (AFH)**

Zpětnou vazbu k našim výrobkům a případné dotazy zasílejte na níže uvedené kontaktní údaje.

**E-mailová adresa:**

[info@automationforhumanity.com](mailto:info@automationforhumanity.com)

**Internetová stránka:**

<https://automationforhumanity.com>

**Výrobce:**



AFH Europe Sp. z o.o.,  
Pl. Solny 14/3, 50-062  
Wroclaw, Polsko

### 6.2 Hlášení incidentů

Incident zařízení musí splňovat následující definici:

„Závažným incidentem“ se rozumí incident, který přímo nebo nepřímo vedl nebo mohl vést k některé z následujících situací:

- (a) Smrt pacienta, uživatele nebo jiné osoby;
- (b) Dočasné nebo trvalé závažné zhoršení zdravotního stavu pacienta, uživatele nebo jiné osoby;
- (c) Vážné ohrožení veřejného zdraví a bezpečnosti;

Měl by být neprodleně oznámen výrobci, tj. AFH Europe Sp. z o.o. a prezidentu Úřadu pro registraci léčiv a zdravotnických prostředků a biocidních přípravků, kde je přípravek registrován. Informace by měly být zaslány na adresu výrobce a do poštovní schránky jeho kanceláře:

**E-mailová adresa:**

[incydenty@urpl.gov.pl](mailto:incydenty@urpl.gov.pl)

Formuláře jsou k dispozici zde:

**Internetová stránka:**

<https://www.urpl.gov.pl/pl/wyroby-medyczne/informacje-dotycz%C4%85ce-bezpiecze%C5%84stwa/formularze>.

Žádost lze rovněž zaslat evropskému ekvivalentu prezidenta Úřadu pro registraci léčiv, zdravotnických prostředků a biocidních přípravků.

### Evropské prohlášení o shodě s nařízením o zdravotnických prostředcích, (EU)

Výrobce: AFH Europe Sp. z o.o.,  
PL. Solny 14/3, 50-062 Wrocław, Polsko

Toto prohlášení o shodě je vydáváno na výhradní odpovědnost společnosti AFH Europe Sp. z o.o.  
Tímto prohlašujeme, že níže uvedené produkty, které jsou navrženy tak, aby kompenzovaly zranění  
nebo zdravotní postižení, splňují ustanovení nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Základní UDI-DI          | 59056026412 RSC02XS                        |
| Název značky:            | AFH Europe Sp. z o.o.,                     |
| Název produktu:          | RSC02 Sprchová židle                       |
| Model(y);                | RSC02                                      |
| Klasifikační pravidlo:   | Pravidlo 1, nesterilní a neaktivní produkt |
| Způsob posuzování shody: | Třída 1 - Vlastní prohlášení               |
| Kód GMDN:                | 34936 Židle, vana/sprcha                   |

Zařízení je navrženo tak, aby kompenzovalo zranění nebo zdravotní postižení.

Datum vydání: 2022-12-27 <sup>27</sup>

|         |                |       |            |
|---------|----------------|-------|------------|
| Podpis: | [Podpis]       | Datum | 2022-12-27 |
|         | Název a pozice |       |            |

AFH EUROPE Sp. z o.o.,  
Pl. Solny 14/3, 50-062  
Wrocław, Polsko  
NIP 7831815151  
REGON 385897820

